


Matériel(s) requis:

- Aucun


Outil(s) requis:

- Ruban à mesurer
- Rapporteur d'angle numérique


1. **LARGEUR DU FAUTEUIL :** De l'extérieur du cadre de chaque côté moins 1/4".

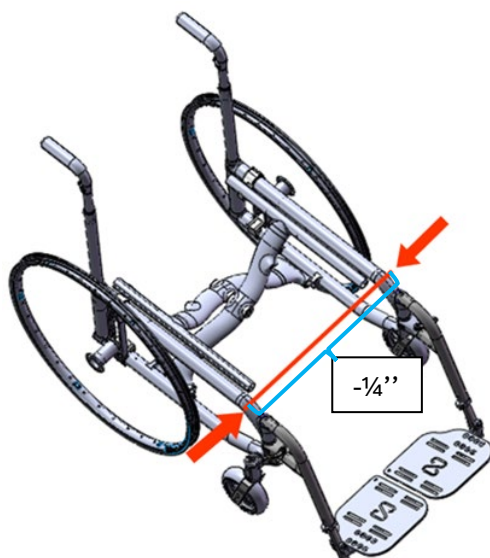


2. **PROFONDEUR DE L'ASSISE :** Devant la canne de dossier vers l'avant de la toile de siège.

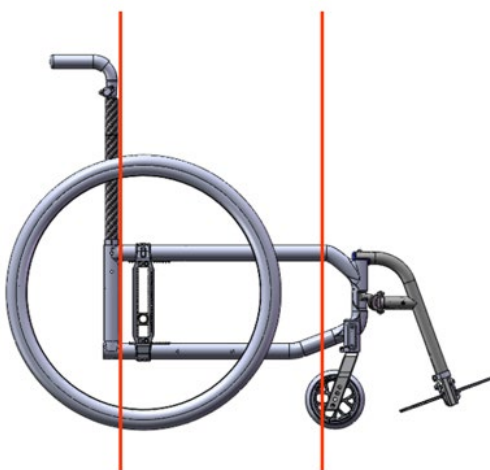


3. **LONGUEUR DU CADRE :** De l'intérieur du tube de cadre arrière à l'intérieur du tube avant.

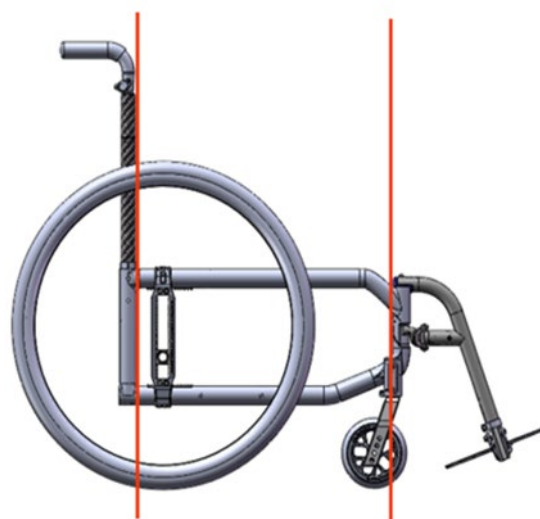

4. **ANGLE ASSISE-DOSSIER :** Du haut du cadre à la canne de dossier.

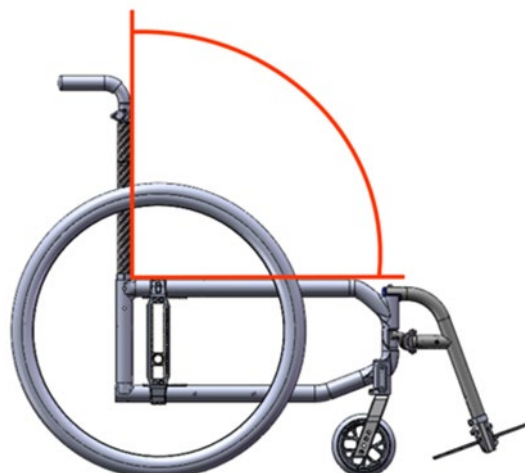

5. **ANGLE DES APPUI-PIEDS :** D'une ligne prolongeant le rail de l'assise vers le bas jusqu'à l'avant du tube de l'appui-pied.

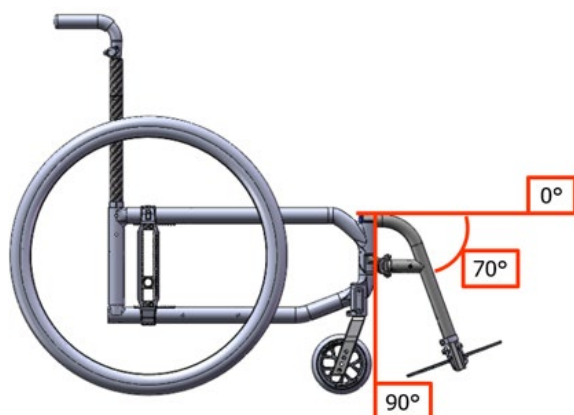

6. **ANGLE DE PALETTES D'APPUI-PIEDS :** De la palette d'appui-pied jusqu'au tube d'appui-pied.



7. **LONGUEUR DE L'ASSISE À LA PALETTE D'APPUI-PIEDS :** De l'avant de la toile de siège vers le centre de la palette d'appui-pieds.




8. **HAUTEUR D'APPUI-BRAS :** Du haut du cadre vers le haut du coussin de l'appui-bras.



9. HAUTEUR DE CANNE DE DOSSIER :


A. Cannes de dossier droites et à 8° (aluminium & carbone) :

STANDARD : Du bas de la bague vers le début du coude de la poignée de poussée.

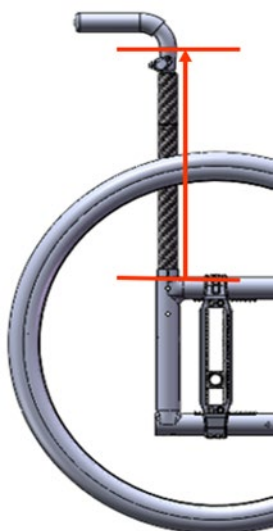

B. Cannes de dossier fixes droites et à 8° (aluminium & carbone) : FIXE :

Du bas de la bague vers le dessus du capuchon.

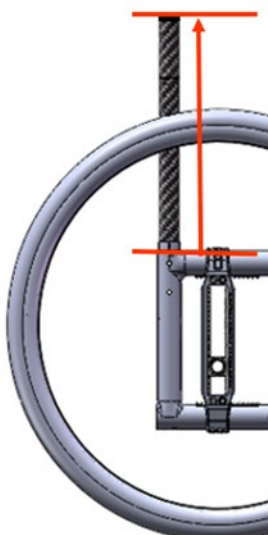

C. Les cannes de dossier ajustables dans tous les angles, angle droit et 8° (aluminium & carbone) :

AJUSTABLE EN ANGLE : Du bas de la bague vers le début du coude de la poignée de poussée.

