

Matériel(s) requis:

- Aucun


Outil(s) requis:

- Ruban à mesurer
- Rapporteur d'angle numérique

1. **LARGEUR DU FAUTEUIL :** De l'extérieur du cadre de chaque côté.



3. **LONGUEUR DU CADRE :** De l'arrière du tube de cadre vers le début du coude de l'appui-pieds.

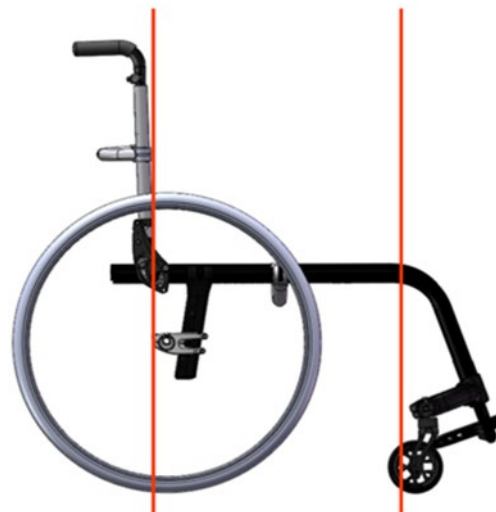

2. **PROFONDEUR DE L'ASSISE :** Du devant de la canne de dossier vers l'avant de la toile de siège.



4. **ANGLE DE CANNE DE DOSSIER :** D'un plancher à niveau vers la canne de dossier.



5. **ANGLE DES APPUI-PIEDS :** D'un plancher à niveau vers le tube avant.



6. **ANGLE DES PALETTES D'APPUI-PIEDS :** De la palette d'appui-pieds vers le tube avant.



7. **LONGUEUR DE L'ASSISE À LA PALETTE D'APPUI-PIEDS :** Du devant de la toile de siège vers le tube de support de palette d'appui-pieds.



8. **HAUTEUR D'APPUI-BRAS :** Du haut du cadre vers le haut du coussin de l'appui-bras.



9. **HAUTEUR DE CANNE DE DOSSIER :** Du haut du cadre de l'assise vers le début du coude de la poignée de poussée OU à l'extrémité du capuchon.

