

INSTRUCTION D'INSTALLATION

PRISE DE MESURES DES FAUTEUILS VELOCE

Matériel(s) requis:

- Aucun

Outil(s) requis:

- Ruban à mesurer
- Rapporteur d'angle numérique

- LARGUEUR DU FAUTEUIL :** De l'extérieur du cadre de chaque côté moins 1/4".




- LONGUEUR DU CADRE :** De l'avant de la canne de dossier au début du protecteur de cadre.



- PROFONDEUR DE L'ASSISE :** Devant la canne de dossier vers l'avant de la toile de siège.



- ANGLE ASSISE-DOSSIER :** Du haut du cadre à la canne de dossier.

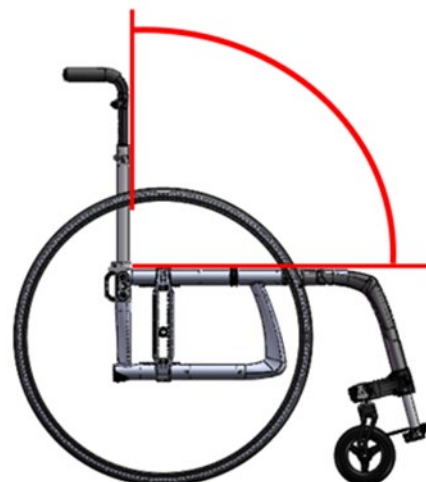

5. **ANGLE DES APPUI-PIEDS :** D'un plancher à niveau vers le tube avant.



6. **ANGLE DE PALETTES D'APPUI-PIEDS :** De la palette d'appui-pieds vers la base du tube avant.



7. **LONGUEUR DE L'ASSISE À LA PALETTE D'APPUI-PIEDS :** De l'avant de la toile de siège vers le tube de support de la palette d'appui-pieds.




8. **HAUTEUR D'APPUI-BRAS :** Du haut du cadre vers le haut du coussin de l'appui-bras.



9. HAUTEUR DE CANNE DE DOSSIER :


A. Cannes de dossier droites et à 8° (aluminium & carbone) :

STANDARD : Du bas de la bague vers le début du coude de la poignée de poussée.

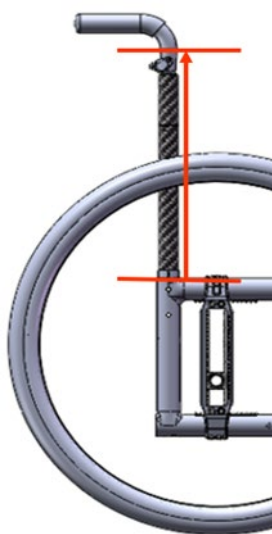

B. Cannes de dossier fixes droites et à 8° (aluminium & carbone) : FIXE :

FIXE : Du bas de la bague vers le dessus du capuchon.

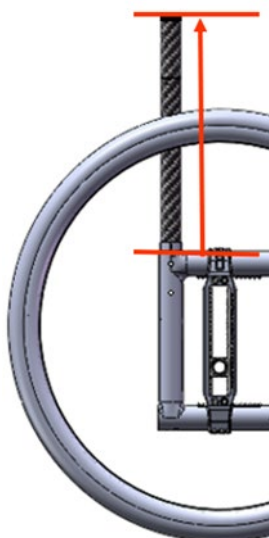

C. Les cannes de dossier ajustables dans tous les angles, angle droit et 8° (aluminium & carbone) :

AJUSTABLE EN ANGLE : Du bas de la bague vers le début du coude de la poignée de poussée.

